


Produkt

Thema/ Produktbeschreibung

Cerclage-Pessar nach Hamann & Jorde

Zu den möglichen Ursachen für eine Frühgeburt gehört die so genannte Zervixinsuffizienz: Der Gebärmutterhals verkürzt sich und der Muttermund öffnet sich vorzeitig. Sie tritt am häufigsten in den ersten Schwangerschaftsmonat auf und kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist sie eine Folge vorangegangener schwieriger Geburten. Auch bei Mehrlingsschwangerschaften kommt es oft zu einer Überdehnung des Gebärmutterhalses.

Cerclage Pessare ermöglichen die Verhinderung einer Zervixinsuffizienz und damit eines Spätaborts oder einer Frühgeburt ohne operativen Eingriff.

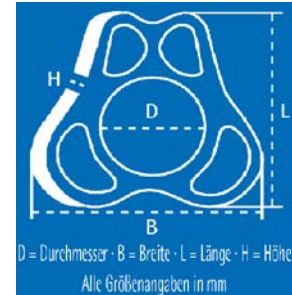

Wesentliche Vorzüge für die geburtshilfliche Praxis bietet das nach Dr. Hamann und Dr. Jorde patentierte Cerclage- & Stütz pessar zur Prophylaxe und Therapie der drohenden Frühgeburt.

Im Sinne der 'unblutigen Cerclage' fängt das Cerclage- & Stütz pessar bei Zervixinsuffizienz den auf den Gebärmutterhals gerichteten Druck ab.

Wirkmechanismus

Das Cerclage- & Stütz pessar verschließt bandartig den Zervixkanal ('unblutige Cerclage'). Eine vernetzte zentrale Lochbohrung im Pessar nimmt die Zervix uteri auf und drückt sie nach hinten (Sakralisation der Zervix). Die Zervix wird durch breites Abstützen des Pessars auf dem Beckenboden entlastet. Es kommt zur Verlagerung des intrauterinen Druckes auf die Uterusvorderwand infolge dorsoventraler Pessarschrägstellung und Sakralisation der Zervix uteri. Das Cerclage- & Stütz pessar bewirkt gleichzeitig eine Formierung bzw. Neuformierung der verkürzten und zum Teil geöffneten Zervix. Der Schutz des unteren Eipols durch die Gesamtheit der vorangehenden Wirkungskomponenten ist somit gegeben.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe: D / L / B / H	Artikelnummer	EAN Code
Cerclage Pessar Gr. I	ø30/59/57/14	MED1000097	4250201201188
Cerclage Pessar Gr. II	ø35/76/70/14	MED1000098	4250201201195
Cerclage Pessar Gr. III	ø35/83/80/14	MED1000099	4250201201201

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\cerclage_pessar_hj.doc

Stand 26.08.2011
Freigegeben am: