


Produkt**Thema/
Produktbeschreibung****Cerclage-Pessar**

Zu den möglichen Ursachen für eine Frühgeburt gehört die so genannte Zervixinsuffizienz: Der Gebärmutterhals verkürzt sich und der Muttermund öffnet sich vorzeitig. Sie tritt am häufigsten in den ersten Schwangerschaftsmonaten auf und kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist sie eine Folge vorangegangener schwieriger Geburten. Auch bei Mehrlingsschwangerschaften kommt es oft zu einer Überdehnung des Gebärmutterhalses.

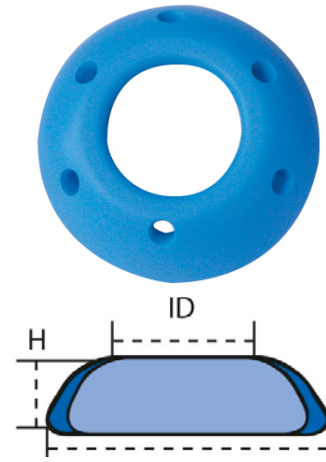

ID = Innendurchmesser; AD = Außendurchmesser; H = Höhe

Die operative Cerclage ist der klassische Weg, eine Zervixinsuffizienz und damit einen Spätabort oder eine Frühgeburt zu verhindern. Einen vergleichbaren Effekt kann man in vielen Fällen auch ohne Operation erreichen: mit medesign Cerclage-Pessaren. Diese in jeder Hinsicht gefahrlose Therapie ist heute, nach mehr als 20-jähriger Erfahrung weltweit, als Alternative zur Operation anzusehen. Für beide Methoden liegen die Erfolgsraten bei 80-90%.

Cerclage-Pessare haben dank ihrer Schalenform und den Höhenmaßen von 17, 21 und 25 mm einen sicheren Sitz. Eingelegt werden die Cerclage-Pessare entsprechend dem klinischen Befund etwa ab der 16. Woche. Je nach bakteriologischem Fluorbefund ist eine Reinigung bzw. ein Austausch erforderlich. Eine kontinuierliche Prüfung des vaginalen pH-Wertes ist sinnvoll. Er sollte zwischen 3,8 – 4,1 liegen.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe: ID / AD / H [in mm]	Artikelnummer	EAN Code
Cerclage-Pessar	32 / 65 / 17	MED1000084	4250201201058
Cerclage-Pessar	32 / 65 / 21	MED1000050	4250201201065
Cerclage-Pessar	32 / 65 / 25	MED1000086	4250201201072
Cerclage-Pessar	32 / 70 / 17	MED1000087	4250201201089
Cerclage-Pessar	32 / 70 / 21	MED1000088	4250201201096
Cerclage-Pessar	32 / 70 / 25	MED1000089	4250201201102
Cerclage-Pessar	35 / 65 / 17	MED1000090	4250201201119
Cerclage-Pessar	35 / 65 / 21	MED1000091	4250201201126
Cerclage-Pessar	35 / 65 / 25	MED1000092	4250201201133
Cerclage-Pessar	35 / 65 / 30	MED1000093	4250201201140
Cerclage-Pessar	35 / 70 / 17	MED1000094	4250201201157
Cerclage-Pessar	35 / 70 / 21	MED1000095	4250201201164
Cerclage-Pessar	35 / 70 / 25	MED1000096	4250201201171

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\cerclage_pessar.doc

Stand 03.08.2011
Freigegeben am:



medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
email: info@medesign.de internet: www.medesign.de