

Cerclage Pessar nach H & J

Thema

Zu den möglichen Ursachen für eine Frühgeburt gehört die so genannte Zervixinsuffizienz: Der Gebärmutterhals verkürzt sich und der Muttermund öffnet sich vorzeitig. Sie tritt am häufigsten zwischen dem 4. und dem 6. Schwangerschaftsmonat auf und kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist sie eine Folge vorangegangener schwieriger Geburten oder eines vorangegangenen Schwangerschaftsabbruchs. Ebenso können Infektionen oder eine einer Gebärmutteroperation eine Zervixinsuffizienz zur Folge haben. Auch bei Mehrlings-schwangerschaften kommt es oft zu einer Überdehnung des Gebärmutterhalses..



Beschreibung

Cerclage Pessare ermöglichen die Verhinderung einer Zervixinsuffizienz und damit eines Spätaborts oder einer Frühgeburt ohne operativen Eingriff.

Wesentliche Vorzüge für die geburtshilfliche Praxis bietet das nach Dr. Hamann und Dr. Jorde patentierte Cerclage- & Stütz pessar zur Prophylaxe und Therapie der drohenden Frühgeburt. Im Sinne der 'unblutigen Cerclage' fängt das Cerclage- & Stütz pessar bei Zervixinsuffizienz den auf den Gebärmutterhals gerichteten Druck ab.

Wirkmechanismus

Das Cerclage- & Stütz pessar verschließt bandartig den Zervixkanal ('unblutige Cerclage'). Eine vernetzte zentrale Lochbohrung im Pessar nimmt die Zervix uteri auf und drückt sie nach hinten (Sakralisation der Zervix). Die Zervix wird durch breites Abstützen des Pessars auf dem Beckenboden entlastet. Es kommt zur Verlagerung des intra-uterinen Druckes auf die Uterusvorderwand infolge dorsoventraler Pessarschrägstellung und Sakralisation der Zervix uteri. Das Cerclage- & Stütz pessar bewirkt gleichzeitig eine Formierung bzw. Neuformierung der verkürzten und zum Teil geöffneten Zervix. Der Schutz des unteren Eipols durch die Gesamtheit der vorangehenden Wirkungskomponenten ist somit gegeben.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Cerclage Pessar	I mm 30/57 mm	1 Stk	MED1000097	7731190	4250201201188
Cerclage Pessar	II mm 35/76 mm	1 Stk	MED1000098	7731209	4250201201195
Cerclage Pessar	III mm 35/83 mm	1 Stk	MED1000099	7731215	4250201201201