

## Produkt

# Cramer-Pessar

### Thema/ Produktbeschreibung

Ist der gesamte Beckenboden geschwächt (z.B. durch schwere Geburten) oder liegt eine angeborene Schwäche des Bindegewebes und der Beckenbodenmuskulatur vor oder auch Übergewicht, kann es zur Senkung von Beckenorganen (Harnblase, Gebärmutter, Scheide und Enddarm) kommen. Die Folgen sind Druck- und Fremdkörpergefühl, sowie Ziehen im Unterleib und in der Kreuzgegend. Blasen- und Stuhlentleerungsstörungen sind oftmals unangenehme Begleiterscheinungen.



**Cramer-Pessare** werden eingesetzt zur Behandlung der Stressinkontinenz (unfreiwilliger Abgang von Harn) und bei Beschwerden, die durch eine Senkung von Scheide, Gebärmutter und Blase entstehen. Diese Senkungen können z.B. durch eine angeborene Bindegewebsschwäche, durch Hormonmangel nach den Wechseljahren oder durch Schwangerschaften und Geburten hervorgerufen werden. Mit Hilfe der Pessarbehandlung unterstützt durch Beckenbodentraining und ggf. östrogenhaltige Cremes gelingt es häufig diese Beschwerden auf konventionelle Weise dauerhaft zu bessern.

Die beiden Verdickungen am oberen Rand des Pessars verlagern den Übergang zwischen Blase und Harnröhre nach oben und verhindert so, dass bei Belastungen wie Husten oder Bewegung unfreiwillig Urin abgeht. Voraussetzung für das Tragen eines **Cramer-Pessars** ist, dass bisher keine vaginale Operation mit einer Raffung der Scheide vorgenommen wurde. Außerdem muss gewährleistet sein, dass der Beckenboden zumindest noch eingeschränkt tragfähig ist.

### Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

### Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

### Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

### Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

### Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Cramer-Pessar	50 mm	MED1000896	4250201202222
Cramer-Pessar	55 mm	MED1000897	4250201202239
Cramer-Pessar	60 mm	MED1000898	4250201202246
Cramer-Pessar	65 mm	MED1000899	4250201202253
Cramer-Pessar	70 mm	MED1000900	4250201202260
Cramer-Pessar	75 mm	MED1000901	4250201202277
Cramer-Pessar	80 mm	MED1000902	4250201202284
Cramer-Pessar	85 mm	MED1000903	4250201202291
Cramer-Pessar	90 mm	MED1000904	4250201202307
Anpassset (MP Kl. I)	60, 65, 70 und 75 mm	MED1001770	4250201208521

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\cramerpessar.doc

Stand 26.08.2011  
Freigegeben am: