

## Produkt

# Keulenpessar



## Thema/ Produktbeschreibung

Zu einer Beckenboden-Senkung oder einem Prolaps kommt es, wenn Organe ihren angestammten Platz verlassen. Normalerweise sind Gebärmutter und Scheide durch bandähnliche Bindegewebsstrukturen und auch durch eine kräftige Hülle um die Scheidenwand am knöchernen Becken angeheftet. Bei einer Schwächung der Beckenboden-muskulatur geben diese Bindegewebsstrukturen nach, so dass die Scheide nach unten sinkt. Die Harnblase und der liegende Mastdarm können in Mitleidenschaft gezogen werden. Fast jede dritte Frau über 45 Jahre leidet an einer mehr oder minder ausgeprägten Form eines solchen Genitalprolaps. Eine konventionelle Behandlungsmethode mit Pessaren, die vom Arzt ausgewählt werden, können viele der auftretenden Symptome beheben.

Der Keulen Pessar aus einem speziellen medizinischen Silikon wurde zur Behandlung großer Prolapse entwickelt und wird bereits jahrelang erfolgreich eingesetzt. Er gibt durch seinen Stiel, der ein Verkanten und Herausrutschen des Rings verhindert, einen größeren Halt. Nach etwa drei Wochen sollte ein kleineres Keulen Pessar eingelegt werden, da es relativ rasch zum Schrumpfen des unteren Scheidengewebes kommt. Häufig kann das Pessar nach mehreren Wochen durch einen Würfel ersetzt werden. Die Handhabung des Keulen Pessars zum Einführen und Herausnehmen ist schwieriger als bei allen anderen Pessaren.

## Gebrauch

Beim Einführen im schrägen Durchmesser faßt man den mit Ladysoft Gleitmittel bestrichenen Ring mit der rechten Hand und drückt ihn vorsichtig, dem geringsten Widerstand folgend, nach hinten unten in die Vagina unter Schonung des empfindlichen Urethrawulstes. Ist der Ring an der Urethra vorbeigerutscht, dreht man ihn in Frontalstellung und schiebt ihn soweit wie möglich nach oben. Das Ende der Keule ist oft noch sichtbar.

Beim Herausnehmen, das oft noch diffiziler ist, wird wie folgt vorgegangen: Den Scheidenbereich und den Rand des Keulen Pessars gut mit Ladysoft Gleitgel benetzen. Dann zieht man am Griff der Keule in der Scheidenachse bis zum Anschlag der Symphyse. Dabei bildet sich oft aus der schlaffen und prolabierten vorderen Vaginalwand ein fingerdicker Wulst als Hindernis. Mit der freien Hand wird der Wulst langsam um den äußeren Rand des Pessars geschoben.

## Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

## Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

## Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

## Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

## Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Keulenpessar	50 mm	MED1000118	4250201201218
Keulenpessar	55 mm	MED1000119	4250201201225
Keulenpessar	60 mm	MED1000120	4250201201232
Keulenpessar	65 mm	MED1000121	4250201201249
Keulenpessar	70 mm	MED1000122	4250201201256
Keulenpessar	75 mm	MED1000123	4250201201263
Keulenpessar	80 mm	MED1000124	4250201201270
Keulenpessar	85 mm	MED1000125	4250201201287
Keulenpessar	90 mm	MED1000433	4250201201294

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\keulenpessar.doc

Stand 26.08.2011  
Freigegeben am:



medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell  
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27  
email: info@medesign.de internet: [www.medesign.de](http://www.medesign.de)