

Keulen Pessar

Thema

Zu einer Beckenboden-Senkung oder einem Prolaps kommt es, wenn Organe ihren angestammten Platz verlassen. Normalerweise sind Gebärmutter und Scheide durch bandähnliche Bindegewebsstrukturen und auch durch eine kräftige Hülle um die Scheidenwand am knöchernen Becken angeheftet. Bei einer Schwächung der Beckenbodenmuskulatur geben diese Bindegewebsstrukturen nach, so dass die Scheide nach unten sinkt. Die Harnblase und der liegende Mastdarm können in Mitleidenschaft gezogen werden. Fast jede dritte Frau über 45 Jahre leidet an einer mehr oder minder ausgeprägten Form eines solchen Genitalprolaps. Eine konventionelle Behandlungsmethode mit Pessaren, die vom Arzt ausgewählt werden, können viele der auftretenden Symptome beheben.



Beschreibung

Der Keulen Pessar aus einem speziellen medizinischen Silikon wurde zur Behandlung großer Prolapse entwickelt und wird bereits jahrelang erfolgreich eingesetzt. Er gibt durch seinen Stiel, der ein Verkanten und Herausrutschen des Rings verhindert, einen größeren Halt. Nach etwa drei Wochen sollte ein kleineres Keulen Pessar eingelegt werden, da es relativ rasch zum Schrumpfen des unteren Scheidengewebes kommt. Häufig kann das Pessar nach mehreren Wochen durch einen Würfel ersetzt werden. Die Handhabung des Keulen Pessars zum Einführen und Herausnehmen ist schwieriger als bei allen anderen Pessaren.

Gebrauchsanweisung

Beim Einführen im schrägen Durchmesser faßt man den mit Ladysoft Gleitmittel bestrichenen Ring mit der rechten Hand und drückt ihn vorsichtig, dem geringsten Widerstand folgend, nach hinten unten in die Vagina unter Schonung des empfindlichen Urethrawulstes. Ist der Ring an der Urethra vorbeigerutscht, dreht man ihn in Frontalstellung und schiebt ihn soweit wie möglich nach oben. Das Ende der Keule ist oft noch eben sichtbar. Beim Herausnehmen, das oft noch diffiziler ist, wird wie folgt vorgegangen: Den Scheidenbereich und den Rand des Keulen Pessars gut mit Ladysoft Gleitgel benetzen. Dann zieht man am Griff der Keule in der Scheidenachse bis zum Anschlag der Symphyse. Dabei bildet sich oft aus der schlaffen und prolabierte vorderen Vaginalwand ein fingerdicker Wulst als Hindernis. Mit der freien Hand wird der Wulst langsam um den äußeren Rand des Pessars geschoben.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Keulen Pessar	50 mm	1 Stk	MED1000118	7275585	4250201201218
Keulen Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000119	7275579	4250201201225
Keulen Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000120	7275562	4250201201232
Keulen Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000121	7275556	4250201201249
Keulen Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000122	7275533	4250201201256
Keulen Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000123	7275473	4250201201263
Keulen Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000124	7275467	4250201201270
Keulen Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000125	7275450	4250201201287
Keulen Pessar	90 mm	1 Stk	MED1000433	7275444	4250201201294