

Produkt

Urethra-Pessar

Thema/ Produktbeschreibung

Die Ursachen für einen unwillkürlichen Harnverlust unterscheiden sich je nachdem, welche Form vorliegt. In den meisten Fällen ist der Harnabgang Zeichen einer anatomischen oder funktionellen Störung.

Das **medesign Urethra-Pessar** ermöglicht eine bewährte konventionelle Behandlung. Durch die Ringform mit Kalotte kann eine Stützung der Harnröhre und eine Verbesserung der Harnröhrenverschlussfunktion erreicht werden.



Das Urethra-Pessar hat sich seit ca. 40 Jahren in der Praxis bewährt. Die Verdickung am oberen Rand stützt die beim Pressen und Husten tiefer tretende Harnröhre und verbessert ihre Verschlussfunktion. Der dünne Teil des Urethra-Pessars wird zuerst mit etwas Gleitmittel (z.B. Ladysoft) eingeführt.

Bei der Platzierung der Kalotte muss die exakte Lage unter der Urethra erreicht werden. Normalerweise verrutscht das Urethra-Pessar sehr selten. Kommt es trotz des richtigen Sitzes des Ringes zum Harnfluss, muss die Lage der Kalotte geprüft oder das Pessar größer gewählt werden.

Das medesign Urethra-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 u. 80 mm.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Urethra-Pessar	45 mm	MED1000060	4250201201508
Urethra-Pessar	50 mm	MED1000437	4250201201515
Urethra-Pessar	55 mm	MED1000061	4250201201522
Urethra-Pessar	60 mm	MED1000062	4250201201539
Urethra-Pessar	65 mm	MED1000063	4250201201546
Urethra-Pessar	70 mm	MED1000064	4250201201553
Urethra-Pessar	75 mm	MED1000065	4250201201560
Urethra-Pessar	80 mm	MED1000066	4250201201577
Urethra-Pessar	85 mm	MED1000067	4250201201584
Urethra-Pessar	90 mm	MED1000068	4250201201591
Urethra-Pessar	95 mm	MED1000070	4250201201607
Urethra-Pessar	100 mm	MED1000069	4250201201614
Anpassset (MP Kl. I)	65, 70, 75 und 80 mm	MED1000765	4250201201621

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\urethrapessar.doc

Stand 20.08.2011
Freigegeben am:



medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
email: info@medesign.de internet: www.medesign.de