

Urethra Pessar

Thema

Die Ursachen für einen unwillkürlichen Harnverlust unterscheiden sich je nachdem, welche Form vorliegt. In den meisten Fällen ist der Harnabgang Zeichen einer anatomischen oder funktionellen Störung.

Beschreibung

Das medesign Urethra Pessar ermöglicht eine bewährte konventionelle Behandlung. Durch die Ringform mit Kalotte kann eine Stützung der Harnröhre und eine Verbesserung der Harnröhrenverschlussfunktion erreicht werden.

Das Urethra Pessar hat sich seit ca. 40 Jahren in der Praxis bewährt. Die Verdickung am oberen Rand stützt die beim Pressen und Husten tiefer tretende Harnröhre und verbessert ihre Verschlussfunktion.



Anwendung

Der dünne Teil des Urethra Pessars wird zuerst mit etwas Gleitmittel (z.B. Ladysoft) eingeführt. Bei der Platzierung der Kalotte muss die exakte Lage unter der Urethra erreicht werden. Ohne Kohabilitation verrutscht das Urethra Pessar sehr selten. Kommt es trotz des richtigen Sitzes des Ringes zum Harnfluss, muss die Lage der Kalotte geprüft oder das Pessar größer gewählt werden.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Urethra Pessar	45 mm	1 Stk	MED1000060	7280681	4250201201508
Urethra Pessar	50 mm	1 Stk	MED1000437	7280497	4250201201515
Urethra Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000061	7280468	4250201201522
Urethra Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000062	7280451	4250201201539
Urethra Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000063	7280445	4250201201546
Urethra Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000064	7280439	4250201201553
Urethra Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000065	7280422	4250201201560
Urethra Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000066	7280416	4250201201577
Urethra Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000067	7280161	4250201201584
Urethra Pessar	90 mm	1 Stk	MED1000068	7280155	4250201201591
Urethra Pessar	95 mm	1 Stk	MED1000070	7280149	4250201201607
Urethra Pessar	100 mm	1 Stk	MED1000069	7280066	4250201201614