

Produkt

Thema/ Produktbeschreibung

Urethra-Schalen-Pessar

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch eine schnelle Geburtenfolge, sehr schwere Kinder oder Mehrlinge. Blasen- und Stuhlentleerungsstörungen, wie beispielsweise unwillkürlicher Harnverlust, sind oftmals unangenehme Begleiterscheinungen.



Das **medesign Urethra-Schalen-Pessar** ist eine Kopplung des Schalenpessars mit einer entsprechend geformten Kalotte, die genau unter der Urethra platziert wird. Die Verdickung am oberen Rand stützt die beim Pressen und Husten tiefer tretende Harnröhre und verbessert ihre Verschlussfunktion. Sein robuster Körper ist dem 'sensiblen' Urethra-Pessar bei stärkerem Descensus überlegen. Dennoch ist der Patientin zu empfehlen, das Urethra-Schalen-Pessar abends zu entfernen. Wegen der größeren Auflagefläche ist die Druckbelastung des Gewebes wesentlich geringer.

Bei der Platzierung der Kalotte muss die exakte Lage unter der Urethra erreicht werden. Normalerweise verrutscht das Urethra-Schalen-Pessar sehr selten. Kommt es trotz des richtigen Sitzes des Ringes zum Harnfluss, muss die Lage der Kalotte geprüft oder das Pessar größer gewählt werden.

Das medesign Urethra-Schalen-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 u. 80 mm.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Urethra-Schalen-Pessar	55 mm	MED1000071	4250201201638
Urethra-Schalen-Pessar	60 mm	MED1000072	4250201201645
Urethra-Schalen-Pessar	65 mm	MED1000073	4250201201652
Urethra-Schalen-Pessar	70 mm	MED1000074	4250201201669
Urethra-Schalen-Pessar	75 mm	MED1000075	4250201201676
Urethra-Schalen-Pessar	80 mm	MED1000076	4250201201683
Urethra-Schalen-Pessar	85 mm	MED1000077	4250201201690
Anpassset (MP Kl. I)	65, 70, 75 und 80 mm	MED1000488	4250201201706

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\urethraschalenpessar.doc

Stand 26.08.2011
Freigegeben am: