

## Produkt

## Thema/ Produktbeschreibung

# Würfel-Pessar

Durch die Evolution des aufrechten Gangs ist der Beckenboden des Menschen den Wirkungen der Schwerkraft ausgesetzt. Besonders betroffen davon ist der Beckenboden der Frau. Deshalb zählt die Genitalsenkung zu den häufigsten Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde.

Die Wahrscheinlichkeit, an einem so genannten Genitaldeszensus zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Faktoren wie Mangel an weiblichen Hormonen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, Ernährungsgewohnheiten, genetisch bedingte Gewebsschwäche erhöhen das Risiko.

Die konservative Behandlung der Genitalsenkung, die ambulant durchgeführt wird, umfasst unter anderem die Hormontherapie, die Beckenbodengymnastik, Reizstrom und die Verwendung von Pessaren. Bis heute sind Würfel-Pessare unübertroffen, vor allem in der Selbstbehandlung. Durch ihre gute Haftfähigkeit und ihre sehr einfache Anwendung sind Würfel-Pessare für die meisten Formen der Genitalsenkung einsetzbar.

Die nach innen gewölbten Flächen des Würfel-Pessars saugen sich an der Scheidenwand fest und die Kanten des Würfels stützen das Gewebe. Der medesign Pessar repositioniert die Organe in die anatomisch richtigen Lage und wirkt dem Vorfall bzw. der Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entgegen.

Die nach innen gewölbten Flächen des Würfel-Pessars saugen sich an der Scheidenwand fest und die Kanten des Würfels stützen das Gewebe. Der medesign Pessar repositioniert die Organe in die anatomisch richtigen Lage und wirkt dem Vorfall bzw. der Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entgegen.

Das medesign Würfel-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 1, 2, 3, und 4.

## Anwendung

**medesign Würfel-Pessare** werden morgens von der Patientin selbst eingelegt und abends wieder entfernt. Die im Verhältnis zu Ring-Pessaren kleinen Würfel können leicht eingeführt und mit Hilfe des Zugfadens wieder entfernt werden. Die nächtliche Entlastung der Schleimhaut und des Beckengewebes stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Pessarformen dar.

## Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

## Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisches Silikon

## Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

## Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

## Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Würfel-Pessar	Gr. 0 / 25mm	MED1000078	4250201201713
Würfel-Pessar	Gr. 1 / 29mm	MED1000079	4250201201720
Würfel-Pessar	Gr. 2 / 32mm	MED1000080	4250201201737
Würfel-Pessar	Gr. 3 / 37mm	MED1000081	4250201201744
Würfel-Pessar	Gr. 4 / 41mm	MED1000082	4250201201751
Würfel-Pessar	Gr. 5 / 45mm	MED1000083	4250201201768
Anpassset (MP Kl. I)	Gr. 1,2,3,4	MED1000487	4250201201874

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\wuerfelpessar.doc

Stand 23.08.2011  
Freigegeben am:



medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell  
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27  
email: info@medesign.de internet: [www.medesign.de](http://www.medesign.de)

