

Produkt

Würfel Pessar RV vakuumreduziert

Thema

Durch die Evolution des aufrechten Gangs ist der Beckenboden des Menschen den Wirkungen der Schwerkraft ausgesetzt. Besonders betroffen davon ist der Beckenboden der Frau. Deshalb zählt die Genitalsenkung zu den häufigsten Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde.



Die Wahrscheinlichkeit, an einem so genannten Genitaleszensus zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Faktoren wie Mangel an weiblichen Hormonen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, Ernährungsgewohnheiten, genetisch bedingte Gewebeschwäche erhöhen das Risiko.

Beschreibung

Die konservative Behandlung der Genitalsenkung, die ambulant durchgeführt wird, umfasst unter anderem die Hormontherapie, die Beckenbodengymnastik, Reizstrom und die Verwendung von Pessaren. Bis heute sind Würfel Pessare unübertroffen, vor allem in der Selbstbehandlung. Durch ihre gute Haftfähigkeit und ihre sehr einfache Anwendung sind Würfel Pessare für die meisten Formen der Genitalsenkung einsetzbar.

Die nach innen gewölbten Flächen des Würfel-Pessars saugen sich an der Scheidenwand fest und die Kanten des Würfels stützen das Gewebe. Der medesign Pessar repositioniert die Organe in die anatomisch richtigen Lage und wirkt dem Vorfall bzw. der Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entgegen.

Durch die Löcher im Silikon wird das Vakuum reduziert, wodurch eine leichtere Entfernung des **medesign Würfel Pessars** ermöglicht wird.

Anwendung

Das Würfel Pessar wird morgens von der Patientin selbst eingelegt und abends wieder entfernt. Die im Verhältnis zu Ringpessaren kleinen Würfel können leicht eingeführt und mit Hilfe des Zugfadens wieder entfernt werden. Die nächtliche Entlastung der Schleimhaut und des Beckengewebes stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Pessarformen dar.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Würfel Pessar (RV) Gr. 0 / 25 mm	1 Stk.	MED1000645	7286152	4250201201775
Würfel Pessar (RV) Gr. 1 / 29 mm	1 Stk.	MED1000644	7286146	4250201201782
Würfel Pessar (RV) Gr. 2 / 32 mm	1 Stk.	MED1000643	7286117	4250201201799
Würfel Pessar (RV) Gr. 3 / 37 mm	1 Stk.	MED1000642	7286092	4250201201805
Würfel Pessar (RV) Gr. 4 / 41 mm	1 Stk.	MED1000641	7285997	4250201201812
Würfel Pessar (RV) Gr. 5 / 45 mm	1 Stk.	MED1000640	7285974	4250201201829
Würfel Pessar (RV) Gr. 6 / 55 mm	1 Stk.	MED1000949	7285804	4250201201836
Würfel Pessar (RV) Gr. 7 / 65 mm	1 Stk.	MED1000950	7285796	4250201201843
Würfel Pessar (RV) Gr. 8 / 70 mm	1 Stk.	MED1000951	7285690	4250201201850
Würfel Pessar (RV) Gr. 9 / 75 mm	1 Stk.	MED1001177	7285661	4250201201867

Ergänzende Produkte

Ladysoft (separate Produktbeschreibung)

Bezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Ladysoft Gleitgel	30 ml	MED1000030	7633398	4250201200013

Medizinprodukt IIa

- 1 Pessar mit Bedienungsanleitung
- 1 Ladysoft mit Bedienungsanleitung

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell
 Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
 email: info@medesign.de internet: www.medesign.de

