

Produkt

Würfelpessar Tandem

Thema

Durch die Evolution des aufrechten Gangs ist der Beckenboden des Menschen den Wirkungen der Schwerkraft ausgesetzt. Besonders betroffen davon ist der Beckenboden der Frau. Deshalb zählt die Genitalsenkung zu den häufigsten Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde.



Die Wahrscheinlichkeit, an einem so genannten Genitaldeszensus zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Faktoren wie Mangel an weiblichen Hormonen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, Ernährungsgewohnheiten, genetisch bedingte Gewebsschwäche erhöhen das Risiko.

Beschreibung

Das **medesign Würfelpessar Tandem** eignet sich zur Behandlung von extremer Scheiden- und Gebärmutterensenkung. Es besteht aus zwei aneinander gekoppelten Würfelpessaren. Ähnlich wie beim Würfelpessar bewirken die konkaven Flächen die gute Haftung. Das **medesign Würfelpessar Tandem** kann auch bei Streßinkontinenz nützlich sein. Dann übernimmt der untere Würfel die Stützfunktion der Harnröhre und der obere Würfel garantiert die Haftung.

Anwendung

medesign Tandempessare werden morgens von der Patientin selbst eingelegt und abends wieder entfernt. Der im Würfelpessar sicher verankerte Rückholfaden erleichtert die Entfernung. Die im Verhältnis zu Ringpessaren kleinen Würfel können leicht eingeführt und mit Hilfe des Zugfadens wieder entfernt werden. Die nächtliche Entlastung der Schleimhaut und des Beckengewebes stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Pessaren dar.

Material

Silikon

Klassifikation

Medizinprodukt IIb

Produkt Daten

Bezeichnung	Größe	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Würfel Pessar Tandem	1-0 / 29-25 mm	MED1001071	4655577	4250201201881
Würfel Pessar Tandem	2-1 / 32-29 mm	MED1001070	4655583	4250201201898
Würfel Pessar Tandem	3-2 / 37-32 mm	MED1001069	4655608	4250201201904
Würfel Pessar Tandem	4-3 / 41-37 mm	MED1001068	4655614	4250201201911
Würfel Pessar Tandem	5-4 / 45-41 mm	MED1001067	4655629	4250201201928
Würfel Pessar Tandem	6-5 / 55-45 mm	MED1001094	4013258	4250201201935

Bezeichnung	Größe	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Würfel Pessar Tandem	0-0 / 25-25 mm	MED1001634	6127090	4250201207227
Würfel Pessar Tandem	1-1 / 29-29 mm	MED1001635	6127109	4250201207234
Würfel Pessar Tandem	2-2 / 32-32 mm	MED1001636	6127121	4250201207241
Würfel Pessar Tandem	3-3 / 37-37 mm	MED1001637	6127138	4250201207258
Würfel Pessar Tandem	4-4 / 41-41 mm	MED1001638	6127144	4250201207265
Würfel Pessar Tandem	5-5 / 45-45 mm	MED1001639	6127150	4250201207272

Bezeichnung	Größe	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Würfel Pessar Tandem	0-1 / 25-29 mm	MED1001654		4250201207401
Würfel Pessar Tandem	1-2 / 29-32 mm	MED1001655		4250201207418
Würfel Pessar Tandem	2-3 / 32-37 mm	MED1001656		4250201207425
Würfel Pessar Tandem	3-4 / 37-41 mm	MED1001657		4250201207432
Würfel Pessar Tandem	4-5 / 41-45 mm	MED1001658		4250201207449
Würfel Pessar Tandem	5-6 / 45-55 mm	MED1001659		4250201207456

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell
 Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
 email: info@medesign.de internet: www.medesign.de